

TÜM TEST LİSTESİ

TEST KODU	HASTALIK VE TEST ADI	YÖNTEM	ÖRNEK TÜRÜ	ÖRNEK TÜPÜ	MİKTAR	SAKLAMA KOŞULLARI	TAŞIMA KOŞULLARI	ÇALIŞMA/RAPORLAMA SÜRESİ	NUMUNE RED KRİTERLERİ
1	Periferik kandan kromozom analizi	Uzun Süreli Hücre Kültürü	Kan	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	15 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler
2	Kemik İliğinden kromozom analizi	Kısa Süreli Hücre Kültürü	Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	15 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler
3	Amniyosentez materyalinden kromozom analizi	Uzun Süreli Hücre Kültürü	Amniyon Sıvısı	Pistonsuz Enjektör	20 mL	2-8 °C	2-18 °C	15 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Siyah Pistonlu Enjektöre alınmış numuneler • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler
4	Düşük materyalinden kromozom analizi	Uzun Süreli Hücre Kültürü	Abort Materyali	Steril Transfer Medyumu	20-30 mg	2-8 °C	2-18 °C	15 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • Alkol ya da formol içerisine alınmış Abort ve CVS örnekleri
5	Deri biyopsisi kültüründen kromozom analizi	Uzun Süreli Hücre Kültürü	Cilt biyopsisi	Steril Transfer Medyumu	20 mg	2-8 °C	2-18 °C	15 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • Alkol ya da formol içerisine alınmış Abort ve CVS örnekleri

6	CVS materyalinden kromozom analizi	Uzun Süreli Hücre Kültürü	CVS Materyali	Steril Transfer Medyum	20-30 mg	2-8 °C	2-18 °C	15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler - Alkol ya da formol içerisine alınmış Abort ve CVS örnekleri
7	Kordosentez materyalinden kromozom analizi	Uzun Süreli Hücre Kültürü	Kord Kanı	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
8	AS Hızlı Aneuploidi Paneli (FISH) (13,18,21, X, Y)	FISH	Amniyon Sıvısı	Pistonsuz Enjektör	20 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Siyah Pistonlu Enjektöre alınmış numuneler - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler
9	CVS Hızlı Aneuploidi Paneli (FISH) (13,18,21, X, Y)	FISH	CVS Materyali	Steril Transfer Medyum	20-30 mg	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler - Alkol ya da formol içerisine alınmış Abort ve CVS örnekleri
10	AS Hızlı Aneuploidi Paneli (FISH) (16,18)	FISH	Amniyon Sıvısı	Pistonsuz Enjektör	20 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Siyah Pistonlu Enjektöre alınmış numuneler - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler

11	CVS Hızlı Aneuploidi Paneli (FISH) (16,18)	FISH	CVS Materyali	Steril Transfer Medyumu	20-30 mg	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler - Alkol ya da formol içerisine alınmış Abort ve CVS örnekleri
12	Di George FISH	FISH	Amniyon Sıvısı	Pistonsuz Enjektör	20 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Siyah Pistonlu Enjektöre alınmış numuneler - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler
13	Di George FISH	FISH	CVS Materyali	Steril Transfer Medyumu	20-30 mg	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler - Alkol ya da formol içerisine alınmış Abort ve CVS örnekleri
14	Mikrodelesyon FISH Analizleri	FISH	Amniyon Sıvısı	Pistonsuz Enjektör	20 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Siyah Pistonlu Enjektöre alınmış numuneler - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler
15	Mikrodelesyon FISH Analizleri	FISH	CVS Materyali	Steril Transfer Medyumu	20-30 mg	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler - Alkol ya da formol içerisine alınmış Abort ve CVS örnekleri
16	ALK FISH	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması

17	ROS1 FISH	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması
18	HER2 FISH	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması
19	c-MET FISH	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması
20	NTRK 1-2-3 FISH	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması
21	BCR-ABL (9;22) FISH	FISH	Kan/Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
22	1p19q Glioma FISH	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması
23	SRV FISH	FISH	Kan/Kemik İliği	Heparinli Kan	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
24	RET (10q11) FISH	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	3-7 Gün	
25	BCL2/C18 FISH	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

26	FGFR3 (4q16.3) FISH	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması
27	c-MYC (8q24) FISH	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması
28	XIST (Xq13.2) FISH	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
29	19qTel/20pTel Subtelomerik FISH	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
30	AML FISH Paneli	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
31	KLL FISH Paneli	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

32	MDS FISH Paneli	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
33	MM FISH Paneli	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
34	NHL FISH Paneli	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
35	Pediyatrik ALL FISH Paneli	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
36	p53 FISH	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

37	Prader Willi Angelman FISH	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
38	SHOX FISH	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
39	c-MYC-BCL2	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması
40	c-MYC-BCL6	FISH	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması
41	CBFB (inv16)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
42	D13S319 (13q14)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

43	PDGFRB (Breakapart)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
44	t(8;21)(AML/ETO)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
45	t(11;14)(CCND1/IGH)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
46	t(1;19)(E2A/PBX1)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
47	t(4;11)(MLL/AFF1)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

48	t(12;21)(TEL/AML1)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
49	t(14;16)(MAF/IGH)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
50	t(8;14)(IGH/MYC)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
51	t(9;22)(BCR/ABL1/ASS1)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
52	t(4;14)(FGFR3/IGH)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

53	MLL (KMT2A)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
54	del20q(PTPRT/MYBL2)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
55	11q22.3 (ATM)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
56	1q/1p (CKS1B/CDKN2C)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
57	6q23.3(MYB)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

58	14q32(IGH Plus Breakapart)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
59	8q24.21 (cMYC Breakapart)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
60	t(9;6)(DEK/NUP214)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
61	t(14;20)(IGH/MAFB)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
62	t(15;17)(PML/RARA)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

63	Saethre-Chotzen/ Williams	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
64	4q12(FIF1L1/CHIC2/PDGFR)	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
65	CEP8	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
66	CEP7	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
67	CEP10	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

68	CEP4	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
69	CEP12	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
70	CEP17	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
71	DiGeorge TBX1 + 22q13.3 Deletion Probe Combination	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
72	D7S486/EGFR/RELN Deletion Probe	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

73	Del (5q) Deletion Probe	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
74	CCND2 Breakapart/12cen in Aqua Probe	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
75	IKZF1 Breakapart Probe	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
76	Prader-Willi/Angelman (SNRPN) Probe	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
77	EVI1 Breakapart Probe	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

78	P16 Deletion Probe	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
79	IGH/BCL2 Plus Translocation, Dual Fusion Probe	FISH	Kan Kemik İliği	Heparin'li	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
80	DNA Fingerprinting Maternal Kontaminasyon	Fragman Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	5 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
81	Trombofili Paneli 6 Mutasyon (MTHFR C677T, MTHFR A1298C, FII, FV Leiden, PAI, F13)	Real Time PCR	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
82	Kardiyovasküler Risk Paneli (MTHFR C677T, MTHFR A1298C, FII, FV Leiden, FV Cambridge, PAI, F13, APOE2, APOE4, APOB, ACE, HPA1, FGB-Beta Fibrinojen)	Real Time PCR Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

83	Y Kromozomu Mikrodelesyon Analizi (SRY, AZFa - AZFb – AZFc)	Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
84	FMF, Ailesel Akdeniz Ateşi - 11 mutasyon	RT-PCR Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
85	FMF, Ailesel Akdeniz Ateşi- Tüm Gen Dizi Analizi	Dizi Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
86	CFTR MLPA Analizi	Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

87	SMA MLPA Analizi	Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
88	DMD MLPA Analizi	Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
89	BRCA1-2 MLPA Analizi	Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
90	HBA MLPA Analizi	Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
91	QF-PCR ile Kromozom Analizi	Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı		2-8 °C	2-18 °C	3-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

92	Beta Talasemi (HBB Tüm Gen Dizi Analizi) - Akdeniz Anemisi	Dizi Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
93	CFTR (Tüm Gen Dizi Analizi)	Dizi Analizi NGS	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
94	PAH (Tüm Gen Dizi Analizi)	Dizi Analizi NGS	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
95	BTD (Tüm Gen Dizi Analizi)	Dizi Analizi NGS	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
96	CYP21A2 (Tüm Gen Dizi Analizi)	Dizi Analizi NGS	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

97	HFE (Tüm Gen Dizi Analizi)	Dizi Analizi NGS	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
98	Fragile-X Kromozom Analizi	Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
99	Çölyak Genotiplendirme Testi	Real Time PCR	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
100	HLA B51/B27 RT PCR Analizi	Real Time PCR	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
101	JAK-2	Real Time PCR	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

102	KRAS	Real Time PCR	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C Oda sıcaklığı	2-18 °C Oda sıcaklığı	5-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
103	EGFR	Real Time PCR	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C Oda sıcaklığı	2-18 °C Oda sıcaklığı	5-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
104	BRAF	Real Time PCR	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C Oda sıcaklığı	2-18 °C Oda sıcaklığı	5-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
105	NRAS	Real Time PCR	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C Oda sıcaklığı	2-18 °C Oda sıcaklığı	5-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
106	MSI	Real Time PCR Fragment Analizi	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C Oda sıcaklığı	2-18 °C Oda sıcaklığı	5-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

107	CALR Mutasyon	Real Time PCR	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
108	MPL W515 A/L/K/R Mutasyon	Real Time PCR	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
109	BCR-ABL1 p210-p190	Real Time PCR	Kan Kemik iliği	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
110	MGMT Metilasyon	Real Time PCR	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	10-15 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
111	ID/KIMERİZM	Fragment Analizi	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	5-7 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

112	NIPT	NGS	Kan	Özel Tüp	8-10 mL	2-8 °C	2-18 °C	7-10 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
113	CES	NGS	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	30-45 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
114	WES	NGS	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	30-45 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
115	Akciğer Kanseri Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
116	Akciğer Kanseri Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

117	GIST-MİDE Kanser Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
118	GIST-MİDE Kanser Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
119	Glioma Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
120	Glioma Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
121	Kolorektal Kanser Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

122	Kolorektal Kanser Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
123	Meme Kanser Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C Oda sıcaklığı	2-18 °C Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
124	Meme Kanser Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
125	Melanom Kanser Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
126	Melanom Kanser Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

127	Mesane Kanseri Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
128	Mesane Kanseri Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
129	Over Kanseri Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
130	Over Kanseri Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
131	Pankreas Kanseri Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

132	Pankreas Kanseri Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
133	Prostat Kanseri Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
134	Prostat Kanseri Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
135	Sarkoma Kanseri Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
136	Sarkoma Kanseri Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

137	Testis Kanseri Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
138	Testis Kanseri Plus Paneli	NGS	Doku Kesiti	Parafin Blok	2 mikron 10-12 kesit	Oda sıcaklığı	Oda sıcaklığı	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
139	Multi Kanseri Solid Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
140	Ailesel Kanseri Paneli	NGS	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
141	Hematolojik Kanseri Paneli	NGS	Kan	EDTA'lı	2-5 mL	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	- Numune miktarının yeterli olmaması - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler

142	S500 TMB Kanser Paneli	NGS	Likit Biyopsi Doku Kesiti	Streck Tüp Parafin Blok	8-10 mL 2 mikron 10-12 kesit	2-8 °C	2-18 °C	20-25 Gün	• Numune miktarının yeterli olmaması • Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması • Pıhtılaşmış kan örnekleri • Hasar görmüş örnek tüpleri/ kaplarındaki numuneler • 72 saatten daha uzun süre sonra laboratuvara ulaşmış örnekler
-----	------------------------	-----	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------	---------	-----------	---